

Smart Skin Care®

Ver4.64追加機能について

平素よりSmartSkinCare アプリをご利用いただき、誠にありがとうございます。

此度、Ver4.64 アップデートより新機能を追加いたしました。

●前回測定項目反映機能

前回の測定時に選択した測定項目が端末に保存され、次回の測定時に測定項目を選択することなく前回と同じ項目の測定を行うことが可能になります。

ホーム 測定項目選択

☒ キメ ☐ シミ ☐ 美白値/エイジング ☐ 毛穴 ☒ 水分量 ☒ 皮脂量 セブテープの使用 ☐

選択した項目を測定

すべての項目を測定

初回測定



ホーム 測定項目選択

☒ キメ ☐ シミ ☐ 美白値/エイジング ☐ 毛穴 ☒ 水分量 ☒ 皮脂量 セブテープの使用 ☐

選択した項目を測定

すべての項目を測定

次回の測定

「すべての項目を測定」を選択した場合は、次回の測定時にはすべての測定項目が選択された状態になります。

ホーム 測定項目選択

☐ キメ ☐ シミ ☐ 美白値/エイジング ☐ 毛穴 ☐ 水分量 ☐ 皮脂量 セブテープの使用 ☐

選択した項目を測定

すべての項目を測定

初回測定



ホーム 測定項目選択

☒ キメ ☒ シミ ☒ 美白値/エイジング ☒ 毛穴 ☒ 水分量 ☒ 皮脂量 セブテープの使用 ☐


選択した項目を測定

すべての項目を測定


次回の測定

●グラフ色プリセット機能


肌チェックの過去データグラフについて、グラフ色を3つのプリセットから選択することが可能になりました。

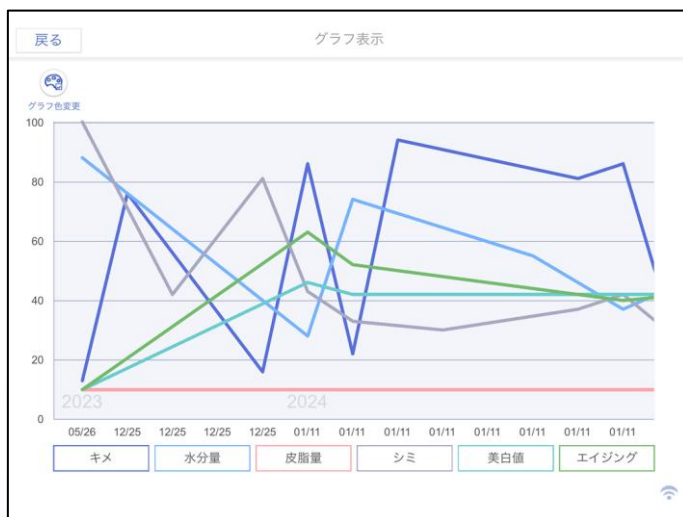

デフォルト

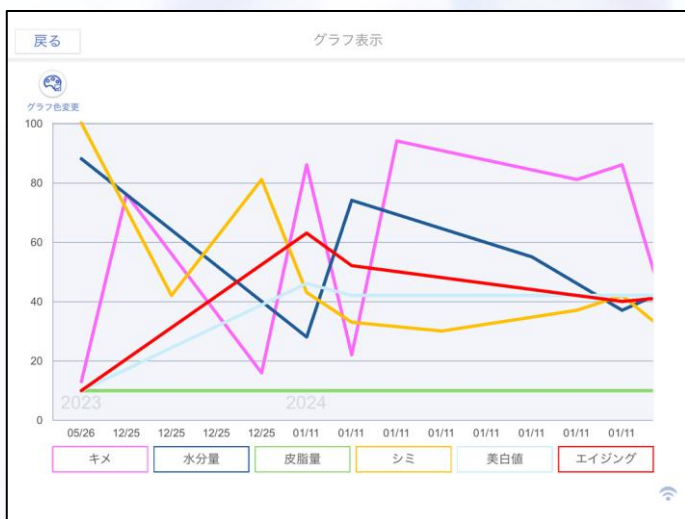

テーマ1

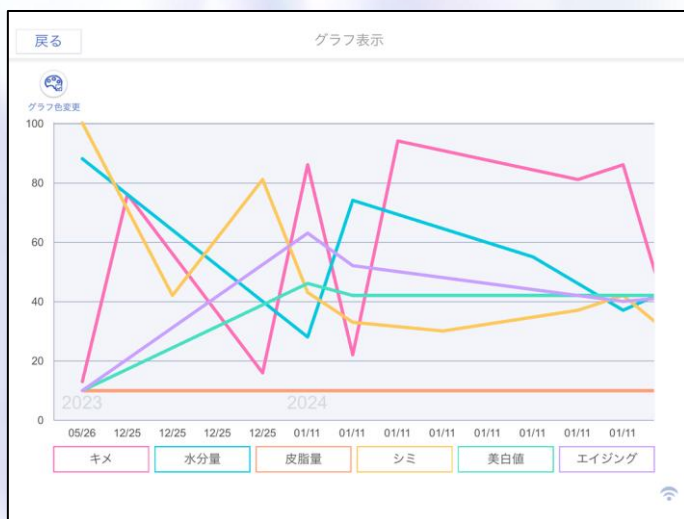

テーマ2