

Smart Skin Care®

SEBUTAPE 設定機能の追加

クライアントアプリVer4.65におきまして、SEBUTAPE設定機能を追加しました。本設定は測定に使用するSEBUTAPEについて、現行製品（S2C-SEBUTAPE-1）とリニューアル製品（S2C-SEBUTAPE/A）を切り替えるための機能となります。



HOME画面の  アイコンを選択し、設定画面に遷移します。

「設定」の項目に「セブテープの設定」が追加されています。



測定で使用するSEBUTAPEを選択して設定を保存します。設定は端末ごとに保存され、測定時には選択したSEBUTAPEによる皮脂量の評価を行います

◆リニューアル製品（S2C-SEBUTAPE/A）設定時



「撮影見本」に**リニューアル製品（S2C-SEBUTAPE/A）**のイメージが表示されます

◆現行製品（S2C-SEBUTAPE-1）設定時



「撮影見本」に**現行製品（S2C-SEBUTAPE-1）**のイメージが表示されます